

Инструкция за употреба на система UROX

Представяме поставяне на система UROX преди обуване на панталон.



1. Обуйте боксерките UROX.

2. Поставете на левия си крак торбичката UROX. Прозрачната част трябва да е от предната част на крака, а отворът на торбичката от вътрешна страна, на височината на глезена.



3. Поставете кутията UROX в дюкяна на боксерките UROX.

4. Поставете половия си орган през силиконовата мембрана в кутията UROX.



5. Маркучът трябва да излиза от дюкяна на боксерките UROX.



6. Отрежете маркуча с ножица, така че да останат 2-3 сантиметра резерва, за да не излезе от торбичката. Стискайки края, го сложете в отвора в торбичката.

7. Проверете дали отворът на

торбичката е затворен.

8. Преди сваляне на системата изпразнете торбичката UROX.

9. След употреба измийте системата под силна струя течаща вода, след това сложете една капачка течност UROX и разтърсете. Излейте разтвора чрез отвора на торбичка.



UROX[®] МОДЕРНО РЕШЕНИЕ ЗА МЪЖЕ С УРОЛОГИЧНИ СМУЩЕНИЯ

Какво е система UROX?

UROX е съвсем нова система за събиране на урина за мъже. UROX дава възможност за водене на нормален живот въпреки проблемите, свързани с незадържане на урина или често уриниране.



Системата се състои от 3 части:

- Еластична кутия, съобразена с размера на мъжкия полов орган
- Специални боксерки които задържат кутията
- Еластична торбичка за крак с вграден резервоар за урина

Внимание: системата UROX трябва да се мие със специалната „течност за дезинфекция UROX”, която я предпазва от бактерии и неприятни миризми. Използването на обикновени средства за дезинфекция могат да повредят системата или да причинят алергични реакции по кожата. Не подсушавайте системата в сушилня или с помощта на сешоар. Топлината може да повреди деликатните елементи на системата.

За кого е предназначена системата UROX?



простата.

- За мъже оплакващи се от чести микции – поради увеличаване на простата, лечение или ослабен пикучен мехур.
- За мъже, които имат затруднения по време на работа и практикуване на хоби да уринират.
- За мъже, които имат проблеми със задържането на урина: при неврологични заболявания, инвалиди и мъже след операция на

Производител:
www.urox.com
UROlogic Aps
Gershøjvej 4,
4070 Kirke Hyllinge

Дистрибутор за България:
www.elmiko.bg
„Адеа” ЕООД
София, ул. Слатинска, бл 46
тел.: 02/ 870 11 08,

Дискретност и икономия



Системата UROX е приспособена за всекидневно ползване и осигурява пълна дискретност. Сложена под обикновено облекло е изцяло незабележима. При правилна дезинфекция с „Течност за дезинфекция UROX” може да се използва дълго време.

И още за системата

Уринирате в кутията. В началото може да е странно и затудняващо, обаче се свиква



UROX

ви се стори бързо и лесно.



Урината от кутията дискретно изтича през маркуча до торбичката, монтирана на крака. Изпразването на торбичката се извършва в удобно за вас време.

Кутията е направена от специална еластична пластмаса, а частта, опираща се в кожата, е от силикон. Това гарантира суха и проветрива кожа.

Кутията е дискретна и удобна, не причинява натиск.

Боксерките задържат кутията така, че тя да не изпада или да се вижда.

Боксерките насочват маркуча така, че уринирането е възможно в различни пози, а урината не се връща обратно.



През нощта

Системата UROX не е проектирана за нощно ползване. Обаче може да се ползва и през нощта. Сложете горната част от системата (кутията) близо до себе си в леглото за лесно намиране и слагане, а долната (торбичката) на пода. Легнете на страни, поставете кутията, оставяйки торбичката на пода. Половият орган трябва да е поставен в кутията. След ползване задържете за малко кутията горе, след това сложете обратно от страни на легло. Не заспивайте по време на извършване на тази дейност.

**За Вашия комфорт и безопасност
кутия, торбичката и боксерки
са достъпни в различни размери.**

Упътване по размери

Талията, размерът на прасеца и дебелината на половия орган са различни при различните мъже. Затова системата UROX е достъпна в няколко размера.

КУТИЯ UROX

За да разберете кой размер кутия трябва да използвате, измерете обиколката на половия си орган в невъзбудено състояние.

Обиколка	Размер
7 – 9 см	S
8,5 – 10 см	M
9,5 – 11 см	L
10,5 – 13 см	XL



ТОРБИЧКА UROX

Измерете обиколката на прасеца на най-дебелото му място.

Обиколка	Размер
29-33 см	S
33-38 см	M
37-42 см	L
41-46 см	XL



БОКСЕРКИ UROX

Боксерките UROX имат размери отговарящи на обикновеното бельо.

Измерете обиколката на бедрата, под корема.

Талия	Размер
86-94 см	S



92-100 см	М
98-106 см	Л
104-112 см	XL
повече от 112 см	XXL